

# Gebrauchsanweisung Spannteil mit Wäschesack



1. Spannteil des Haftrings herunterklappen.



2. WICKELSACK® über den Haftring stülpen.




3. Spannteil des Haftrings hinaufklappen lassen.



+



4. + 5. Der eingespannte Sack wird in dieser Position sicher gehalten.

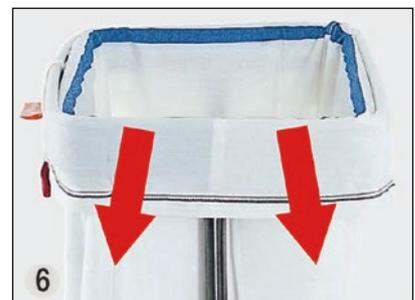

6. Zum Ausspannen den überhängenden Sackrand nach unten ziehen. Das Spannteil des Haftrings klappt nach unten und der Sack kann entnommen werden.

## HINZ Fabrik GmbH

Organisation im Gesundheitswesen

Lankwitzer Straße 17/18 ■ D-12107 Berlin

Tel.: +49 30 74704-0 ■ Fax: +49 30 74704-150

www.hinz.de ■ info@hinz.de